

ENZY-CLEAN

Enzym-Reiniger Konzentrat

Warnhinweise:

Hautkontakt:

Produkt wirkt proteolytisch (= keratolytisch). Das bedeutet, dass bei längerem Kontakt mit der Haut die Hornschicht angelöst werden kann. Jeglicher Hautkontakt sollte deshalb vermieden werden. Beim Einlegen des Endoskops in die Reinigungslösung müssen unbedingt Gummi-Handschuhe getragen werden. Sollten dennoch Spritzer auf Haut gelangen oder gar in die Augen, müssen diese unverzüglich und gründlich mit viel Wasser abgespült werden.

Anwendungskonzentration:

Die angegebenen Anwendungskonzentrationen sollten unbedingt eingehalten werden, um die optimale Reinigungswirkung zu erreichen. Eine Unterdosierung sollte vermieden werden.

Weiterbehandlung:

Nach dem letzten Spülgang - nach der Desinfektion – muß das Spülwasser restlos aus dem Instrument entfernt werden. In verbleibenden Wasserresten können sich Wasserkeime vermehren, die zu Infektionen bei Patienten führen können. Sicherheitshalber sollte das Instrument nach längerer Liegezeit (> 2 Tage) vor Gebrauch erneut desinfiziert werden.

Haltbarkeit:

Ablaufdatum beachten. EnzyClean mit abgelaufener Haltbarkeit sollte nicht mehr verwendet werden.

Hersteller:

CosmArt Laboratorium GmbH
Neuwiesenfeld 21
D- 64625 Bensheim
www.cosmart.de